

miyasuku EyeConSW バージョン 4.3.0 改良内容の説明書参照箇所

スキャン操作	震えによるスイッチの誤入力防止機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.3.2 スイッチ設定画面③④
	キーボードを十字線でスキャンする機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.6.4 スキャン設定⑥
	十字線の色と太さの変更機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.6.2 十字線の速度・スキャン方向設定画面④⑤
ドラッグ操作	複数の通過点をなめらかな曲線でドラッグする機能 (主に絵を描くのに使用)	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 7.5.3.2 複数の通過点をなめらかな曲線でドラッグ&ドロップする操作手順
操作パネル	操作パネルの表示/非表示切替えショートカット キーの無効化機能 (誤操作防止のため)	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.7.4 操作パネルの動作設定画面⑥
	起動時に左クリックモードを連続 On 状態にする機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.7.4 操作パネルの動作設定画面⑤
	操作パネルボタンの枠表示機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.7.3 操作パネルの表示設定画面⑥
	操作パネルのボタン無効化機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.7.5 操作パネルボタンの使用/不使用設定画面
標準キーボード	意思伝達キーボードに、パソコンの音量変更キー追加	意思伝達キーボードの[その他記号]キーを押して、 表示を切り替えると[Mute]、[Vol-]、[Vol+]が追加されています。
	Line のショートカットキーを追加した意思伝達キーボードを追加	キーボードタイプの設定画面に「意思伝達(LINE)」が追加されています。
	Facebook のショートカットキーを追加した意思伝達キーボードを追加	キーボードタイプの設定画面に「意思伝達(Facebook)」が 追加されています。
キーボードメーカー	「元に戻す」、「やり直し」機能	miyasuku キーボードメーカー操作説明書 2 画面の説明
	アプリ起動キーで URL と画像を専用の miyasukuViewer で 表示する機能 (キーを押す都度、複数のタブやアプリが起動するのを防ぐため)	miyasuku キーボードメーカー操作説明書 6.23.LaunchAppKey UseMiyasukuViewer プロパティ

	絵文字キーを追加	miyasuku キーボードメーカー操作説明書 3.1.キーを追加する
	外部スイッチを ON にするキーを追加	miyasuku キーボードメーカー操作説明書 5.キーの一覧 特殊キー スイッチ出力キー 6.33.SwitchOutputKey 6.34.SwitchOutputToggleKey
	絵・文字カード、動画・文字カードキーの PlaySound に設定した音ファイルを再生中にキーボードを無効化する機能	miyasuku キーボードメーカー操作説明書 6.21.CardKey DisableKeyboardUnderSoundPlaying プロパティ 6.22.MovieCardKey DisableKeyboardUnderSoundPlaying プロパティ
意思伝達アプリ	ファイルを開くときのファイルの並べ替え設定に「並べ替えなし」を追加	
	終了時の状態を保存し、次回起動時に復元する機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 7.9.6 意思伝達アプリケーションの設定⑧
その他	Line の画面キャプチャを自動終了する機能	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 8.3.12.5 動作設定画面①
	全画面化対応	miyasuku EyeCon 操作説明書-2.操作説明編 7.24 他のアプリケーションの全画面表示 8.3.12.5 動作設定画面②