

## miyasuku EyeConLT インストール情報回復手順

※google Chrome を使用しています。

1.miyasuku ホームページ右上の「ログイン」をクリックしてください。



2.メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。

### ログイン

ユーザー登録がお済みの方はログインしてください。

※ログインしてください。

メールアドレス	*****@miyasuku.***
パスワード	●●●●●●

ログインする

3.miyasuku ホームページ右側の「【New】製品のご紹介」をクリックしてください。

### マイページ



小川忍 様、ようこそ。

- [製品のご紹介・ダウンロード](#)
- [miyasukuソフトウェアライセンスを購入する](#)

✓	商品代金のお支払
✓	マイページ
✓	【New】新着情報
✓	開発の目的
✓	【New】製品のご紹介
✓	料金体系

4. 「■製品のご紹介」の中から「miyasuku EyeConLT」を探し、クリックしてください。



十アリア堂員は相談支援専門員、入子教授監修のもとで開発されたアプリを一挙に公開いたします！  
価格：8,640円(送料・税込)

**miyasuku EyeConLT**

終了    

miyasuku EyeConLTは、視線入力による意志伝達システム《miyasuku EyeCon》の簡易版です。  
例えば、特別支援学校の先生が作成した教材を、生徒さんが《視線》で操作したり、テストの回答をしたり…  
活用範囲は無限です！！

価格：3,240円(送料・税込)  
※USBメモリでのご提供になります。

5.回復ツールのダウンロードボタンをクリックしてください。


**【重要】Windows10のApril 2018 Updateの更新について**

Windows10のApril 2018 Updateに更新すると、miyasuku EyeConLTのインストール情報を変更される場合があります。  
インストール情報を変更されると、miyasuku EyeConLTが正しくインストールされていないと判断し、起動できなくなります。  
このようになった場合は、回復ツールを実行し、インストール情報を回復してください。


★回復ツールを  **ダウンロード**

6.ダウンロードが終わるまでしばらくお待ちください。


7.ダウンロードが終わったら、「^」の部分をクリックしてください。

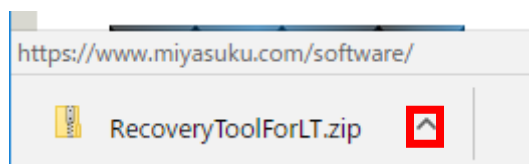


8.表示されたメニューの「フォルダを開く」を選択してください。

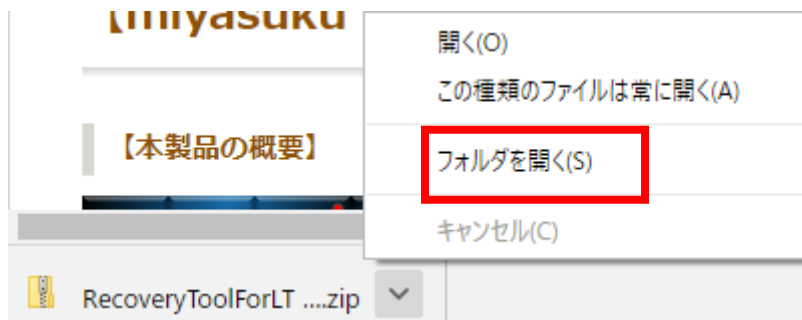


9.「RecoveryToolForLT.zip」ファイルを選択してください。

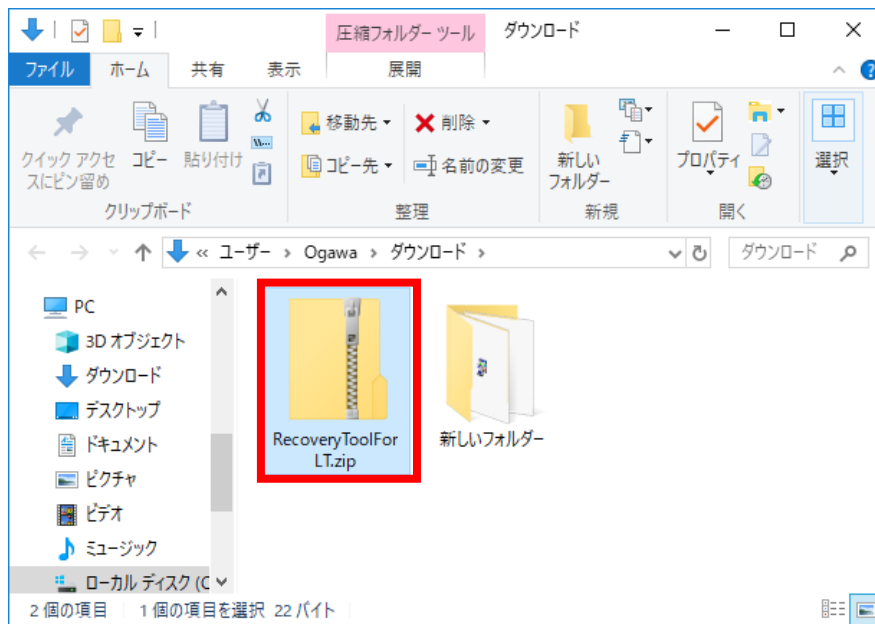


10.画面上部の「展開」をクリックしてください。

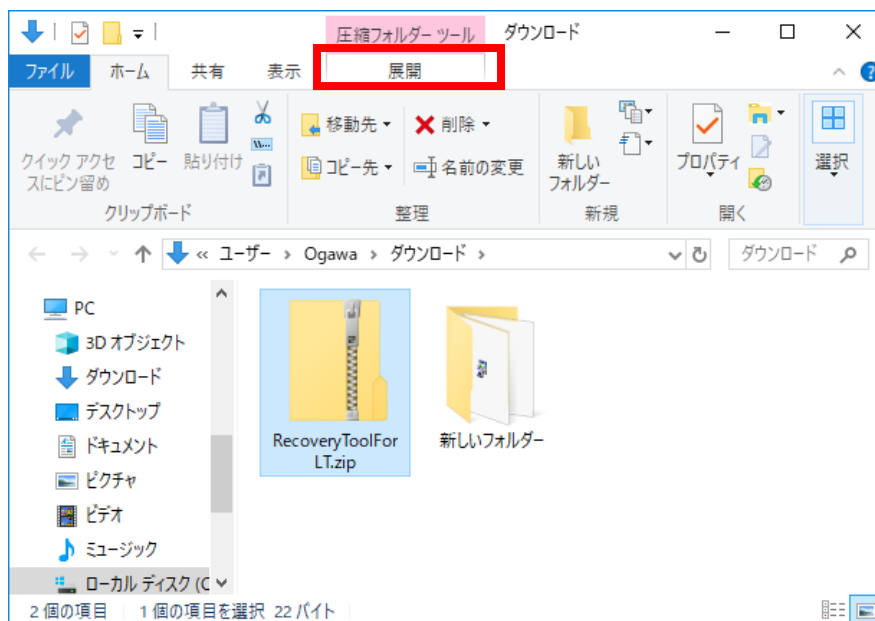


11. 「すべて展開」をクリックしてください。

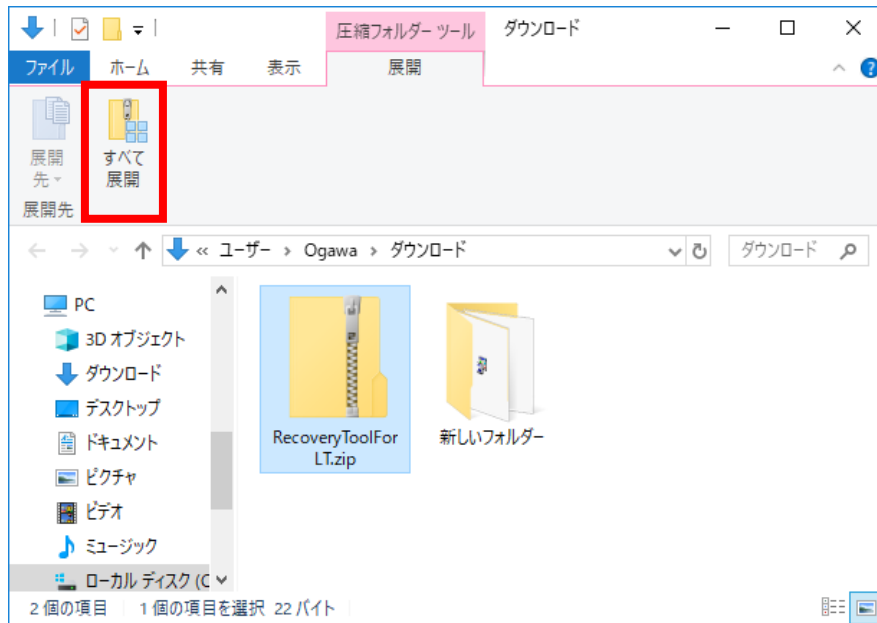


12. 「展開」ボタンをクリックしてください。

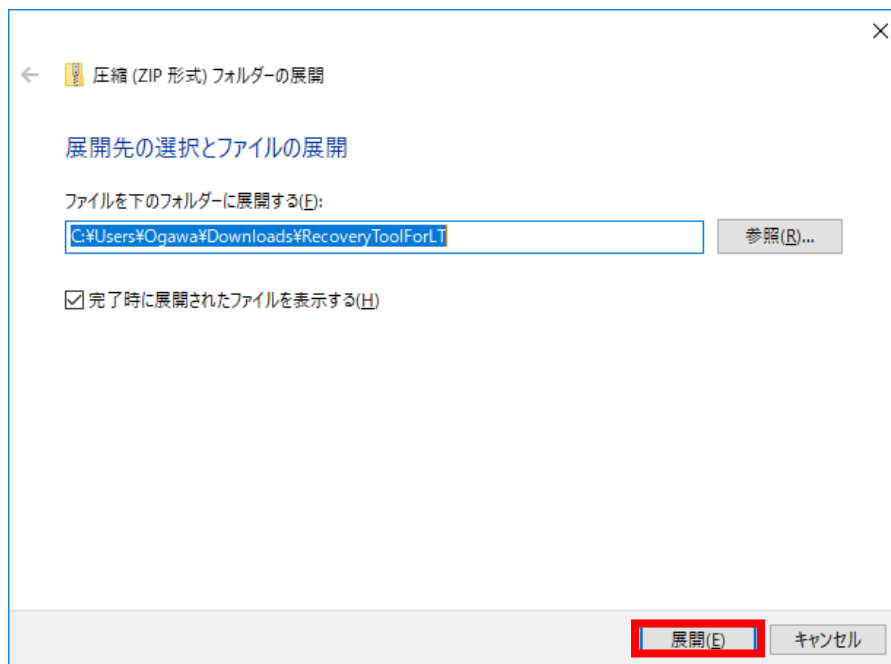

13. 「RecoveryToolForLT.exe」 ファイルを起動してください。

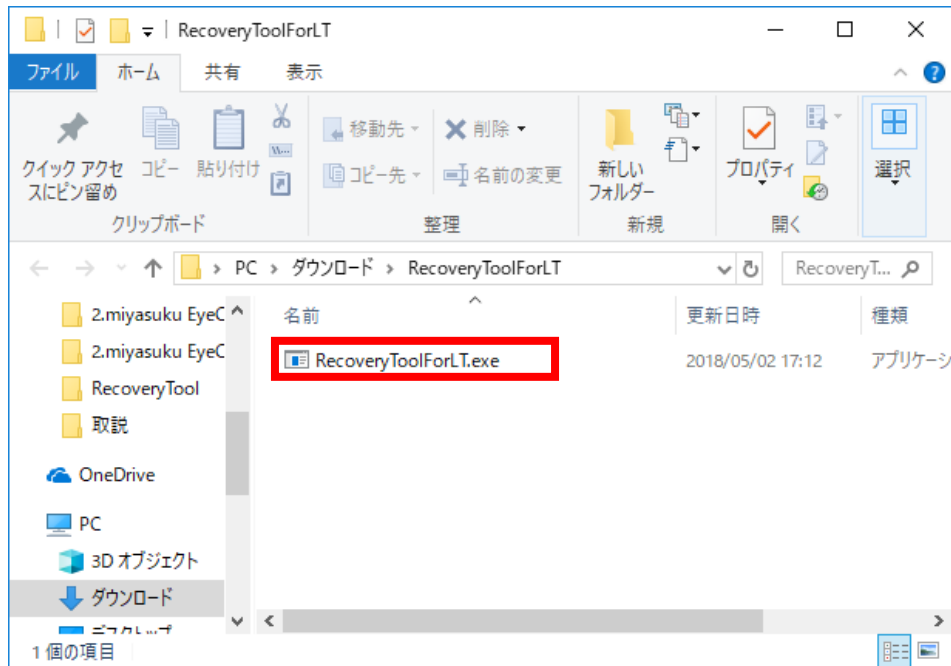

14.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

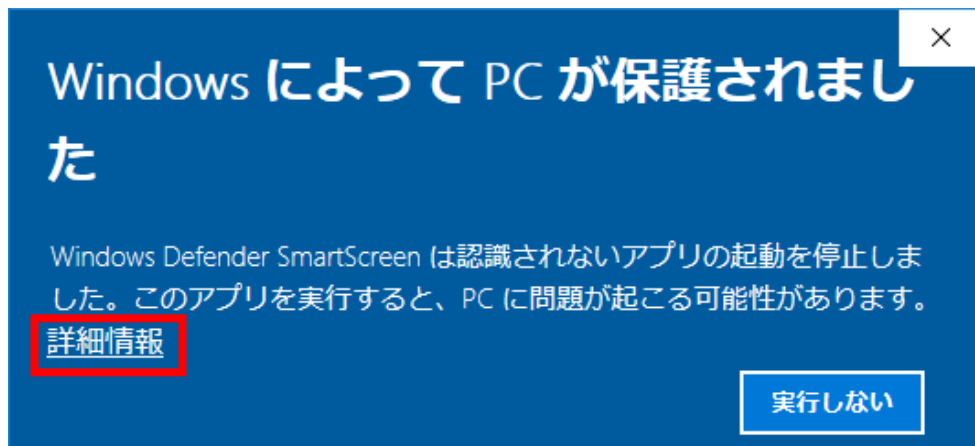

15.「実行」 ボタンをクリックしてください。



16. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」ボタンを押してください。

17. miyasuku EyeConLT のインストール USB をお持ちの場合、パソコンにインストール USB を取り付けてください。

18. 「miyasuku EyeConLT 回復ツール」の「回復」ボタンを押してください。

